



Dansac TRE Technologie erhältlich ...

... für die einteilige Ileo- und Kolostomie-
versorgung in plan, konvex und soft konvex.



... für die zweiteilige Stomaversorgung als
Basisplatten in plan und konvex, die mit allen
NovaLife 2 und Nova 2 Beuteln von Dansac
kombiniert werden können.

... zum Ausgleich von Unebenheiten als
modellierbare Hautschutzringe, die mit allen
verfügbaren Beutelsystemen verwendet werden
können.



Mehr Informationen unter
www.dansac.ch – www.dansac.at

Dansac Schweiz
Liberty Medical Switzerland AG
Bernstrasse 388 • 8953 Dietikon
Tel. 0800 55 38 39
www.dansac.ch

Dansac Österreich
Bergmillergasse 5/1/1
1140 Wien
Tel. 01 877 94 95
www.dansac.at

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.
CE Das Dansac Logo, NovaLife und TRE sind Markenzeichen der Dansac A/S.
© 2019 Dansac A/S

dansac 
Dedicated to Stoma Care

NOVALIFE

NovaLife TRE Hautschutz Praktische Hinweise für Anwender



Shelley,
Ileostomie seit 2015

dansac 


Mithilfe des NovaLife TRE Hautschutzes können Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen

Und so funktioniert der TRE Hautschutz



Um zu verstehen, wie gesunde Haut auch gesund bleibt, ist es wichtig, sich mit dem pH-Wert der Haut und ihrem Säureschutzmantel zu beschäftigen.

- pH ist das Mass, das bezeichnet wie sauer oder alkalisch etwas ist. Die Hautoberfläche ist von Natur aus sauer und hat einen pH-Wert von 4-6, der sogenannte Säureschutzmantel. Er bietet der Haut ein Schutzniveau und antimikrobielle Eigenschaften, um sie gesund zu erhalten.
- Manche Einflüsse können den Säureschutzmantel der Haut schwächen, wie etwa Schweiß oder Stomaausscheidung. Die pH-Puffertechnologie des NovaLife TRE Hautschutzes schafft ein Umfeld, das freundlich zur Haut, jedoch unfreundlich zu Verdauungsenzymen ist.

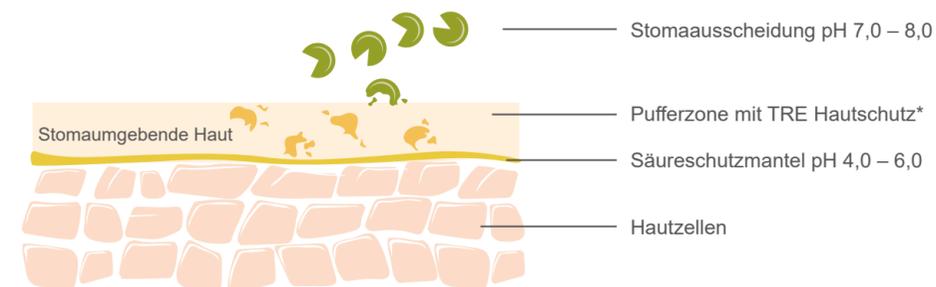


*Entwickelt, um die hautschädigenden Auswirkungen von Verdauungsenzymen auszugleichen

Beim Anbringen der Versorgung



Die Sicherheit Ihrer Stomaversorgung ist ein Thema, worüber Sie sich möglicherweise Gedanken machen. Zur Linderung dieser Sorge fördert der NovaLife TRE Hautschutz das Erzielen einer sicheren Haftung.

- Ihnen wird die weisse Farbe des NovaLife TRE Hautschutzes auffallen. Ebenso werden Sie bemerken, dass der Hautschutz dünner ist, im Vergleich zu unseren ursprünglichen NovaLife Basisplatten.
- Der NovaLife TRE Hautschutz besitzt eine hohe Haftkraft. Er ist konzipiert für Flexibilität, die natürliche Körperbewegungen ermöglicht und unterstützt dabei, Alltagstätigkeiten möglich zu machen, die Ihnen Freude bereiten.

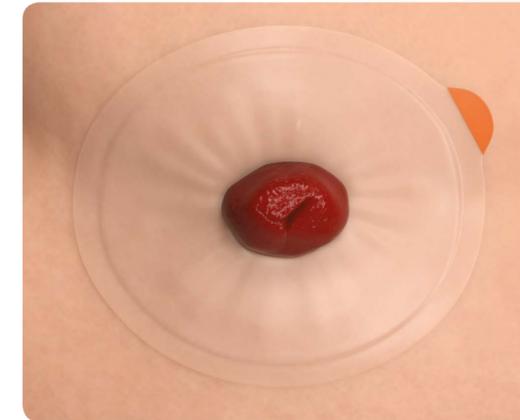

Computeranimation

Während der Tragezeit



Der TRE Hautschutz wurde zur Aufnahme von Stomaausscheidung und Schweiß entwickelt.

- Ihr Stoma hat eine feuchte Oberfläche und Ihre Haut sondert durch die Schweißdrüsen Schweiß ab.
- Im Tagesverlauf bemerken Sie eventuell, dass die weisse Farbe des Hautschutzes heller wird. Hier zeigt sich, dass Ihr Hautschutz die Feuchtigkeit aufnimmt, ohne dabei an Formstabilität und Haftfähigkeit zu verlieren.
- Der Hautschutz quillt in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit auf. Dies kann direkt um das Stoma herum sofort erkennbar sein.




Computeranimation


Nach der Anwendung

Sie werden feststellen, dass der Hautschutz seine Form behält und dennoch einfach zu entfernen ist, wenn es an der Zeit ist Ihre Versorgung zu wechseln.

- Beim Entfernen des Hautschutzes werden Sie die Farbänderung erkennen, die Bereiche mit hoher Feuchtigkeit sichtbar macht. Dies kann weiss gesprenkelt aussehen.
- Nach dem Reinigen und Trocknen Ihres Stomas werden Sie auf der stomaumgebenden Haut wahrnehmen, wie der Hautschutz zur sicheren Haftung beigetragen hat.

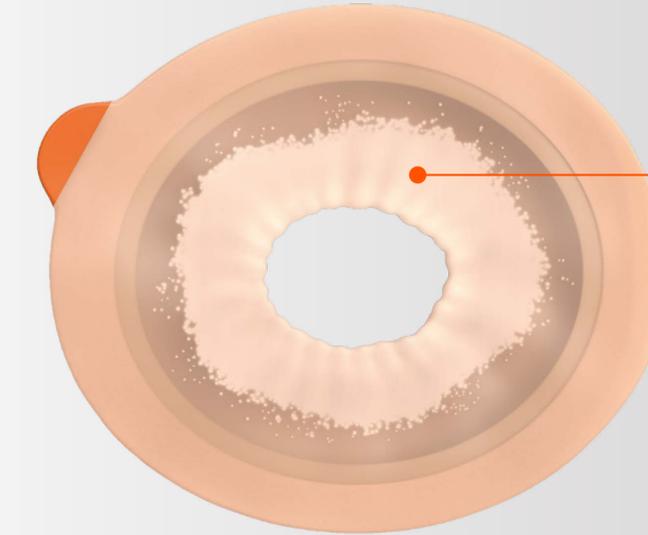

Computeranimation

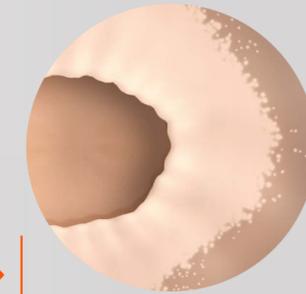

Die Farbänderung hin zu einem helleren Weiss zeigt, dass der Hautschutz Feuchtigkeit aufnimmt.



Beim Entfernen der Versorgung sehen Sie, wie sich der flexible TRE Hautschutz den Körperkonturen der peristomalen Haut angepasst, und natürliche Körperbewegungen zugelassen hat.

Machen Sie sich weniger Gedanken über Hautprobleme dank der Unterstützung des NovaLife TRE Hautschutzes.

Am besten ist natürlich gesunde Haut.