



Dansac TRE Technologie disponible ...

... pour les soins d'iléostomie et de colostomie
1 pièce plane, convexe et soft convexe.



... pour les soins de stomie 2 pièces comme
plaques de base planes et convexes qui
peuvent être combinées avec toutes les poches
NovaLife 2 et Nova 2 de Dansac.

... pour compenser les inégalités comme
anneaux de protection cutanée modelables
qui peuvent être utilisés avec tous les systèmes
de poches Dansac.



Plus d'informations sous
www.dansac.ch

Dansac Suisse
Liberty Medical Switzerland AG
Bernstrasse 388 • 8953 Dietikon
Tél. 0800 55 38 39 • www.dansac.ch

Avant utilisation, veuillez lire le mode d'emploi avec des informations sur la finalité, les contre-indications, les mises en garde, les mesures de précaution et les instructions.
CE Le logo Dansac, NovaLife et TRE sont des marques de la Dansac A/S.
© 2019 Dansac A/S

dansac 
Dedicated to Stoma Care

NOVALIFE

Protecteur cutané NovaLife TRE Conseils pratiques pour les utilisateurs



Shelley,
Iléostomie depuis 2015

dansac 



Avec l'aide du protecteur cutané Novalife TRE, vous pouvez vous sentir bien dans votre peau.

Voici comment fonctionne le protecteur cutané TRE

pH **pH**
Équilibre pH

Pour comprendre comment une peau saine reste saine, il est important d'examiner le pH de la peau et son manteau protecteur acide.

- Le pH est la mesure qui définit le taux acide ou alcalin. La surface de la peau est naturellement acide avec une valeur de pH de 4-6. Elle est appelée le manteau protecteur acide et offre à la peau un niveau de protection avec des propriétés antimicrobiennes qui préservent sa santé.
- Certains influences peuvent affaiblir le manteau protecteur acide, comme la sueur ou les effluents de stomie. La technologie de tampon pH du protecteur cutané Novalife TRE crée un environnement agréable pour la peau et hostile aux enzymes digestives.

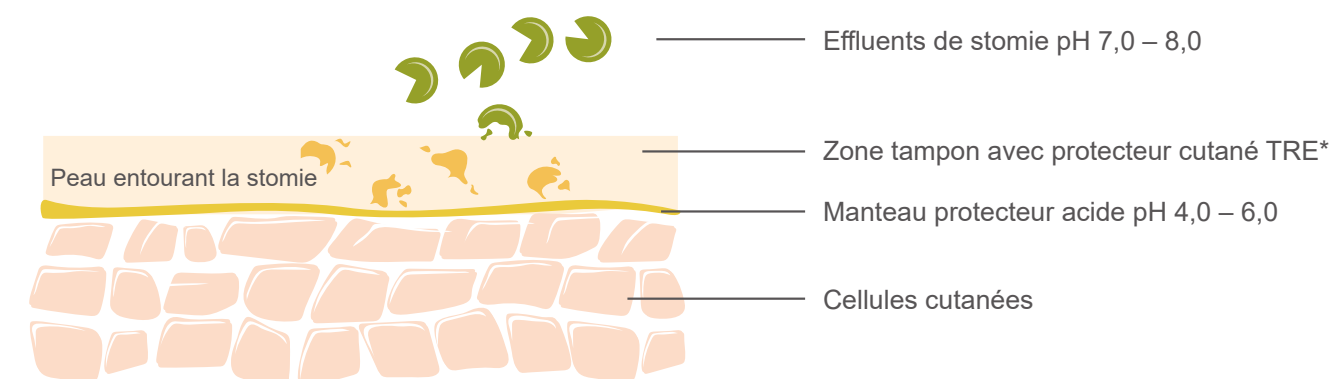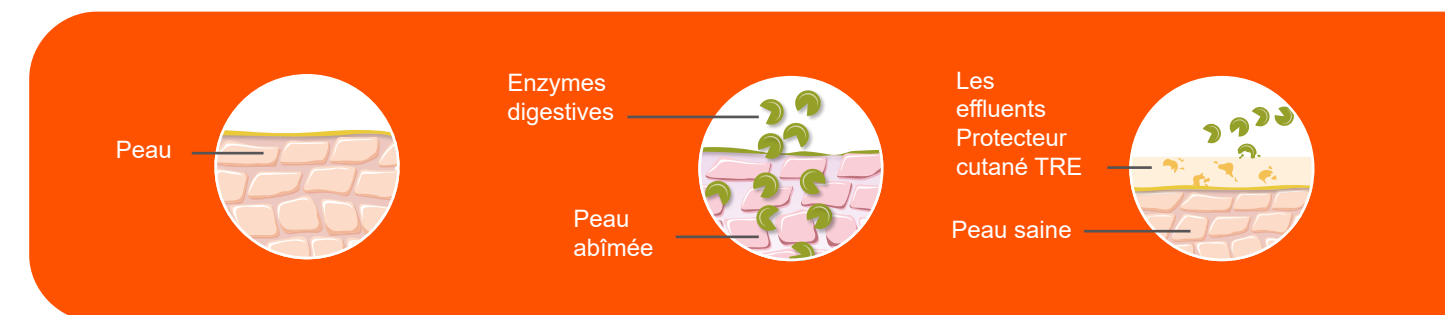

*Développée pour compenser les effets d'enzymes digestives nocives pour la peau

Lors de la pose pendant le soin

Adhérence

La sûreté de vos soins de stomie est un sujet qui peut vous préoccuper. Pour calmer cette inquiétude, le protecteur cutané Novalife TRE aide à obtenir une étanchéité sûre

- Vous allez remarquer la couleur blanche du protecteur cutané Novalife TRE. Vous allez aussi remarquer que la protection cutanée est plus mince que nos premières plaques de base Novalife.
- Le protecteur cutané Novalife TRE a un pouvoir adhésif élevé. Il est conçu pour être flexible, ce qui permet au corps de bouger librement et vous aide à pratiquer vos activités quotidiennes favorites.




Animation par ordinateur

Pendant la durée du port

Absorption d'humidité

Le protecteur cutané TRE a été conçu pour absorber les effluents de stomie et la sueur.

- Votre stomie a une surface humide et votre peau exsude de la sueur par les glandes sudoripares.
- Au cours de la journée, vous remarquerez éventuellement que la couleur blanche de la protection cutanée s'éclaircit. Cela montre que votre protection cutanée absorbe l'humidité sans perdre sa stabilité de forme et son pouvoir adhésif.
- La protection cutanée gonfle dans les zones très humides. On peut remarquer cela directement autour de la stomie.

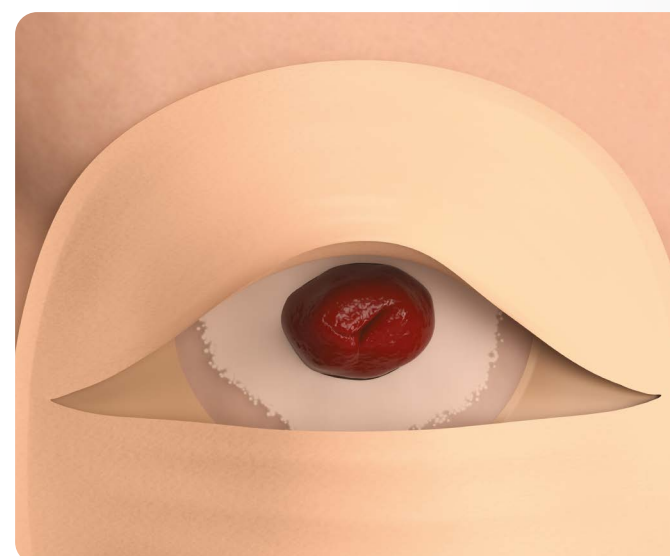


Animation par ordinateur


Après l'utilisation

Vous allez constater que la protection cutanée conserve sa forme tout en étant facile à enlever lorsqu'il est temps de changer le soin.

- En retirant la protection cutanée, vous allez constater le changement de couleur qui rend visible les zones très humides. Cela peut avoir un aspect blanc tacheté.
- Après avoir nettoyé et séché la stomie, vous allez sentir sur la peau qui entoure la stomie comment la protection cutanée a contribué à une étanchéité sûre.

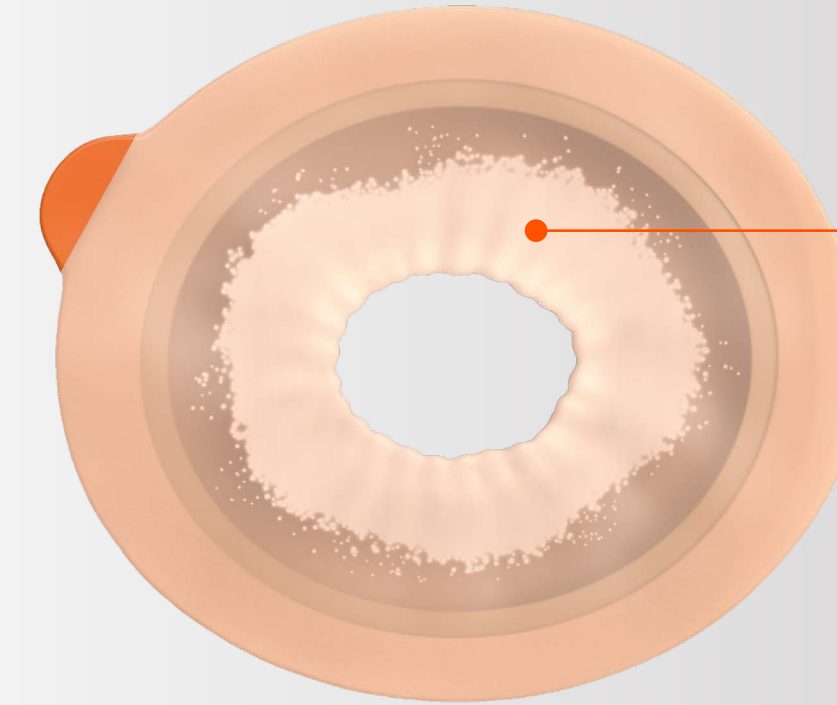

Animation par ordinateur

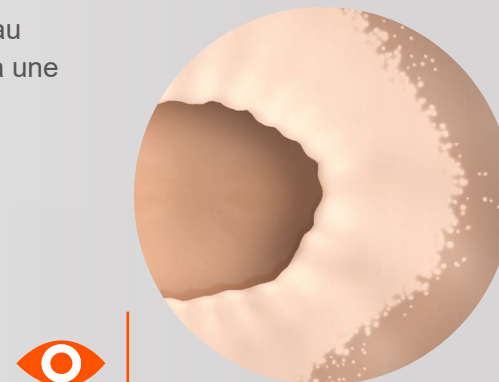

Le changement de couleur jusqu'à un blanc plus clair montre que la protection cutanée absorbe l'humidité.



En enlevant le soin, vous voyez comment le protecteur cutané TRE flexible s'adapte à la peau péristomiale et permet de bouger librement.

Faites vous moins de soucis sur les problèmes de peau grâce au soutien de la protection de Novalife TRE.

Une peau naturellement saine, c'est ce qu'il y a de mieux.